

Alcon
Print Ready PDF

By Goad, Richard

11:16 am, Dec 09, 2019

Alcon PACKAGING

ENABLE OVERPRINT PREVIEW!

FILE NAME: SN00241 I SYSULT SLO

COLORS:
Process Black

ARTIST:
Goad, Richard

ART. REV:
C

DATE:
09.12.2019

SPECIAL INSTRUCTIONS: SPECIAL INSTRUCTIONS GO HERE

VENDORS PLEASE READ BELOW

COATING = 38 – 60 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

HIGH GLOSS COATING = No less than 75 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

MATTE COATING = No greater than 25 gloss units as measured by BYK-Gardner Micro-Gloss 60° gloss meter or similar device.

REF: CORP-000107



DRAWING INFORMATION	
DWG NUMBER:	L00001 REV:1
DWG DESC.:	INSVND, 130MMX230MM, FOLDED TO 130MM X 27MM
DWG DATE:	27/01/2012
REV DESC.:	REVISED TO SHOW METRIC AND IMPERIAL DIMENSIONS

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
TOLERANCE: ±1/32" ± 0.80MM

LEGEND:

- CUT
- FOLD
- NO TEXT
- ALCON DWG. NO. & CONTROL DATE - DIRECTION DETERMINED BY COPY.
- NO TEXT, COLOR OR COATING
- RESERVED FOR BAR CODE

SystemeTM ULTRA

VLAŽILNE KAPLJICE ZA OKO

Pred uporabo natančno preberite navodilo in ga shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.

OPIS:

SYSTANETM ULTRA vlažilne kapljice za oko so sterilna raztopina, ki vsebuje polietilenglikol 400, propilenglikol, hidroksipropilgvar, sorbitol, aminometilpropanol, borovo kislino, kalijev klorid, natrijev klorid in konzervans POLYQUADTM (polidronijev klorid) 0,001%.

UPORABA (Indikacije):

SYSTANETM ULTRA vlažilne kapljice za oko so namenjene zdravljenju suhega očesa za lajšanje pekočega občutka in razdraženosti zaradi izsušene površine očesa. **SYSTANETM ULTRA vlažilne kapljice za oko** lahko uporabljate za lubrikacijo in vlaženje silikonsko-hidrogelnih in mehkih (hidrofilnih) kontaktnih leč, ki so namenjene dnevnemu, podaljšanemu nošenju ali za enkratno uporabo. **SYSTANETM ULTRA vlažilne kapljice za oko** vlažijo vaše kontaktne leče, zmanjšajo neprijeten občutek pri nošenju kontaktnih leč in pomagajo odstraniti delce, ki lahko povzročijo draženje in/ali neprijeten občutek.

KONTRAINDIKACIJE (Ne smete uporabljati):

Teh kapljic ne smejo uporabljati osebe, ki so alergične (preobčutljive) na katerokoli sestavino izdelka **SYSTANETM ULTRA vlažilne kapljice za oko**.

NAVODILA:






SYSTANETM ULTRA vlažilne kapljice za oko lahko uporabljate za zdravljenje suhega očesa ves dan, če je potrebno. Vkapajte kapljice v oko in pomežiknite. Če se med nošenjem kontaktnih leč pojavi manjše draženje, neprijeten občutek ali zamegljen vid, vkapajte 1 ali 2 kapljici v oko in 2-krat ali 3-krat pomežiknite. Kapljice lahko vkapate v oko tudi, preden vstavite kontaktne leče in potem, ko ste jih odstranili. Pred uporabo dobro pretresite.

OPOZORILA:

Pomembno je, da upoštevate navodila svojega očesnega strokovnjaka in vsa navodila za pravilno uporabo izdelka. Če imate stalno neprijeten občutek v očesu, prekomerno solzenje, spremembe vida ali rdečino očesa, se posvetujte s svojim očesnim strokovnjakom, saj bi vaše težave lahko postale resnejše. Ne namakajte ali razkužujte svojih leč v **SYSTANETM ULTRA vlažilnih kapljicah za oko**, ker lahko pride do očesnega draženja.

Začasno zamegljen vid ali druge motnje vida lahko vplivajo na sposobnost vožnje ali upravljanja strojev. Če imate po uporabi izdelka zamegljen vid, počakajte, da se vam vid zbistri, preden smete voziti ali upravljati stroje.

PREVIDNOSTNI UKREPI:

- Kontaminacijo preprečite tako, da se z vrhom kapalnega vsebnika nikoli ne dotaknete nobene površine.
- Samo za očesno uporabo.
- Po uporabi kapalni vsebnik zopet zaprite z zaporko.
- Če izdelek zaužijete, poiščite zdravniško pomoč.
- Ne uporabljajte tega izdelka, če emulzija spremeni barvo.
- **ZAŠČITA PRED POSEGANJEM V IZDELEK:** Ne uporabljajte, če je varnostni pečat poškodovan ali manjka. Ne uporabljajte, če je ovojnina odprta ali poškodovana. 
- Po uporabi ponovno namestite zaporko.
- Kadar izdelka ne uporabljate, mora biti vsebnik tesno zaprt.
- Uporabite pred datumom izteka roka uporabnosti, ki je naveden na izdelku. 
- Izdelek se lahko uporablja do šest mesecev po odprtju. Neuporabljeno raztopino zavržite šest mesecev potem, ko ste vsebnik prvič odprli. 
- Shranjujte nedosegljivo otrokom. 
- Shranjujte pri temperaturi do 30 °C. 

PAKIRANJE:

SYSTANE™ ULTRA vlažilne kapljice za oko so sterilizirane s kombinacijo pare in filtracije. Na voljo so v plastičnih kaplnih vsebnikih velikosti od 8 ml do 15 ml (in v pakiranjih z več vsebniki).

STERILE A



Alcon Laboratories, Inc
6201 South Freeway
Fort Worth, Texas, ZDA 76134-2099
USA

EC REP

Alcon Laboratories Belgium
Lichterveld 3
2870 Puurs-Sint-Amands
Belgium

CE 0123

© 2009, 2013, 2019 Alcon Inc.

SN00241-1119

Alcon